

Durchführungsanleitung zum fetalis®-Test

3. Probenentnahme

! Verwenden Sie hierzu das korrekt beklebte Blutentnahmeröhrchen aus Schritt 2!

Verwenden Sie bitte ausschließlich das im Testkit enthaltene Blutentnahmeröhrchen. Eine Blutabnahme mit anderen Röhrchen und anschließendes Umfüllen in das fetalis®-Test-Röhrchen kann die Analyse stören oder sogar zu einem Ausfall der Probe führen.

- Befüllen Sie das Blutentnahmeröhrchen **vollständig** mit Vollblut. Verwenden Sie dazu die beigelegte Nadel (Vacutainer®-System) und folgen Sie der Anleitung für die Blutentnahme.
- **Wichtig:** Schwenken Sie das Blutentnahmeröhrchen **fünfmal**.
- Lagern Sie das Röhrchen nach Blutentnahme bis zum Versand bei Raumtemperatur. Das gefüllte Röhrchen **nicht kühlen oder einfrieren**.

4. Verpackung und Versand

! Testkits und Blutproben immer bei Raumtemperatur lagern!

- Prüfen Sie vor dem Einpacken und dem Versand nochmals die Patientendaten und stellen Sie sicher, dass das Patientenetikett auf dem Blutröhrchen zu dem auf dem Anforderungsschein passt.
- Verschließen Sie das korrekt beklebte und gefüllte Blutröhrchen in dem Versandröhrchen.
- Legen Sie das Gelpack um das Versandröhrchen und verpacken beides in dem silbernen Luftpolsterbeutel. Das Gelpack dient der Temperaturstabilisierung. Verschließen Sie den silbernen Beutel mit dem Klebestreifen.
- Legen Sie den silbernen Beutel sowie den unterschriebenen und komplett ausgefüllten Anforderungsschein in die blaue Versandtasche.
- Legen Sie die blaue Versandtasche in die Kurierdienst-Versandtasche und benachrichtigen Sie uns für die Abholung: fetalis®-Hotline: **0800 44 30 420** oder Fax: **+43 1 253 3033 5600**

